


PASCO Firmware Updater

Det sker engang imellem at et af PASCOs USB-interfaces ikke opfører sig som det skal, selvom det er tilsluttet korrekt og det har virket fint før. Det gælder også de trådløse interfaces, som jo også kan tilsluttes via USB. Ofte er der kommet en eller flere softwareopdateringer, som af en eller anden grund ikke har igangsat en automatisk opdatering af firmwaren i USB-interfaceset, som det normalt plejer at ske.

PASCO har udviklet et lille, simpelt program, som kan håndtere langt de fleste af disse opdateringer, så man hurtigt og nemt kan komme videre med dataopsamlingen.

Disse interfaces kan opdateres med det lille program:

- PS-2000 Xplorer
- PS-2002 Xplorer GLX
- PS-2100A USBLink
- PS-2001 Powerlink
- PS-2009 SPARKLink
- PS-2010 AirLink2
- PS-2011 SPARKLink Air
- UI-5000 850 Universal Interface
- PI-8127 Funktionsgenerator

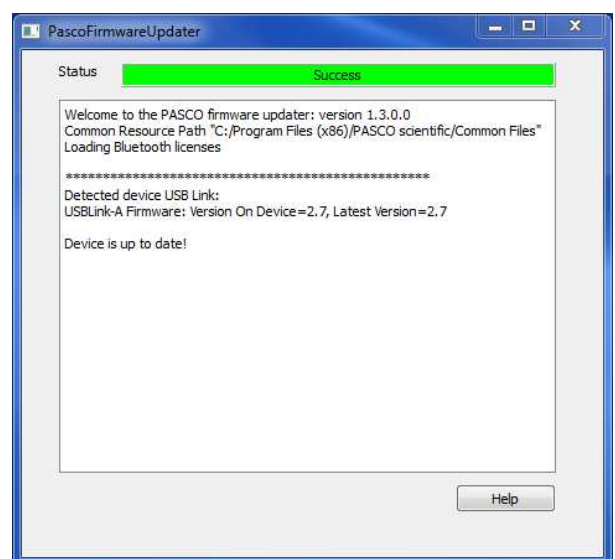

Firmware Update procedure

1. Find en PC, der kører Windows XP, Windows 7 or Windows 8.1. Desværre virker det ikke på Mac.
2. Luk SPARKvue, PASCO Capstone, og/eller DataStudio hvis nogle af disse programmer kører
3. Hvis du har DataStudio installeret, [så deaktiveres PasPortal](#).
4. Download den gratis [PASCO Firmware Updater](#) fra PASCOs hjemmeside (følg linket her eller søg efter "1225" i søgefeltet)
5. Installer PascoFirmwareInstaller. (Din computer kan komme med en sikkerhedsadvarsel. Tillad programmet at blive installeret)
6. Kør *PascoFirmwareUpdater.exe*.
7. Tilslut det berørte PASCO interface *via USB kabel*.
8. Hvis firmwaren findes i den rigtige version allerede, så sker der ikke mere.
9. Hvis firmwaren skal opdateres, så dukker der en boks op, hvor man skal godkende opdateringen ("Yes")
10. Vent på at opdateringen fuldføres



Passion for Science

11. Nu skulle interfacet fungere korrekt igen og Firmware Update programmet kan lukkes.